



FICHA TECNICA

MUAC
26

MUAC²⁶ NIÑOS

Permite medir con precisión y comodidad el perímetro braquial de niños de entre 6 meses y 5 años.

Ayuda a identificar la desnutrición. Es uno de los indicadores que se utilizan para detectar desnutrición aguda y el riesgo de muerte entre niños. Se emplea tanto en niños como en niñas. Duradera y esterilizable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alcance de medición: 26 cm

División: cm/mm

Dimensiones: 330mm x 30mm

Peso: 30grs.

Material: Material plástico resistente al estiramiento

ESCALA CROMÁTICA

Con tabla de referencia, para identificar de un vistazo la situación nutricional del pequeño

RESISTENTE

Material resistente al estiramiento, proveyendo lecturas precisas por largo tiempo



VENTANA DE FÁCIL LECTURA

Permite la toma de datos con claridad, enfocando sobre el valor obtenido.



OTRAS CARACTERÍSTICAS

- La circunferencia de la parte media del brazo se ha investigado exhaustivamente y se ha encontrado que es un indicador preciso del nivel de malnutrición en niños de 6 a 60 meses.
- FACIL DE USAR: El rojo representa la desnutrición severa, amarillo representa riesgo de desnutrición y verde representa nutrición adecuada.
- Según las directrices de UNICEF, los niños con una circunferencia media del brazo de menos de 11,5 cm tienen un mayor riesgo de muerte.

COMO SE UTILIZA?

- Explique el procedimiento a la madre o al cuidador del niño.
- Asegúrese de que el niño o niña no esté usando ninguna ropa en su brazo izquierdo.
- Si es posible, el niño o niña debe pararse derecho y de lado a la persona que mide.
- Doble el brazo izquierdo del niño a 90 grados del cuerpo.
- Encuentre el punto medio de la parte superior del brazo. El punto medio está entre la punta del hombro y el codo.
- Marque con un bolígrafo el punto medio del brazo superior.
- Pídale al niño o niña que relaje el brazo para que cuelgue a su lado.
- Con las dos manos, coloque la ventana de la cinta MUAC (0 cm) en el punto medio.
- Mientras mantiene la mano izquierda firme, envuelva la cinta MUAC alrededor de la parte externa del brazo con la mano derecha.
- Pase la cinta MUAC a través del orificio de la cinta mientras mantiene la mano derecha plantada en el brazo.
- Tire de la cinta hasta que encaje firmemente alrededor del brazo mientras mantiene la mano derecha firme en el brazo del niño.
- Lea y registre la medida que aparece en la ventana de la cinta MUAC al milímetro más cercano (mm).
- Si un niño tiene un MUAC de menos de 12,5 cm (color amarillo o rojo en la cinta) se debe completar un formulario de referencia para que el niño pueda recibir tratamiento.

