



FICHA TECNICA

PEDIOMETROS

P60

P110

P150

PEDIOMETROS **P60** **P110** **P150**

Los **Pediometros VARA** son instrumentos de medición tipo calibre, que le permite al profesional tomar la longitud corporal en niños con precisión, confiabilidad, exactitud y validez.


Permiten obtener información para que el profesional pueda analizar el crecimiento y la maduración del bebe.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Estan contruidos en duro aluminio anodizado, con paletas de medición extragrandes.

PALETA DE MEDICIÓN

La paleta de medición de gran tamaño, construida en ABS/ALTO IMPACTO , se ajusta al vertex de la cabeza con facilidad

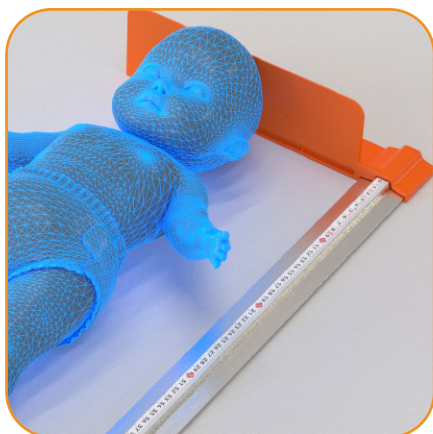

FÁCIL LECTURA

Escala en centímetros y milímetros, con números grandes, colores vivos, de fácil lectura.



VERSIONES DISPONIBLES

MODELO	MEDIDA
P60	Hasta 55cm
P110	Hasta 110cm
P150	Hasta 165cm

COLORES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alcance de medición:55/110/165cm

División: cm/mm

Dimensiones:55cm/110cm/165cm

Peso: 480grs promedio, dependiendo la medida.,

Material Vara: ABS/Alto impacto

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Duradero, esterilizable, liviano, manuable y transportable.
- Adecuados para utilizar en consultorios, hospitales, clínicas, especialmente en pediatría y neonatología.
- Apto para medir niños de más de 2 años.
- Las medidas obtenidas son indicadores que se utilizan en diversas fórmulas o ecuaciones predictivas.
- Nos revela información importante en cuanto a la salud del bebe o de una población.

COMO SE UTILIZA?

- Explique el procedimiento a la persona que acompaña al bebe.
- La exploración se iniciará acostando al bebe sobre la camilla en la posición de Frankfur para que el vertex de la cabeza haga contacto en la paleta fija.
- Luego se estira una sola pierna (puede pedir ayuda de la persona que acompaña al bebe) para que sea el talón el que toque en la paleta móvil.
- El profesional sostiene la cabeza del bebe, la persona que acompaña puede sostener la pierna, y se desliza la paleta móvil para registrar la medida.
- La longitud corporal se toma con el bebe acostado boca arriba.
- De acuerdo con la medida a tomar, asegúrese que el bebe se encuentre en la posición adecuada.
- Las mediciones deben repetirse al menos 2 veces, y tomarse una tercera si fuera necesario. En el primer caso se utiliza la media y en el segundo la mediana. Se recomienda poder obtener ayuda de un anotador.
- Para que toda esta información la podamos aplicar y tenga valides, es necesario que la técnica utilizada, el equipamiento y los profesionales, estén capacitados para realizarla.

